

COVID-19 Vejledning

# Rengøring af mikrofoner



# Vejledning i **rengøring af mikrofoner**

Denne guide er en vejledning i rengøring af mikrofoner og er relateret til COVID-19.

Den omfatter Oticon Amigo, ConnectClip, EduMic og Juno.

Rengøring anbefales, når en mikrofon deles af flere brugere.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har oplyst, at coronavirus er en åndedrætsvirus, der kan overføres fra en inficeret person, primært gennem dråber, fremkaldt af hoste og nys, eller dråber fra spyt eller løbende næser. Det kan ligeledes overføres via personer, der ikke udviser symptomer.

Derfor bør flere brugere af samme mikrofon udvise større omhu.

# Vejledning i **rengøring af mikrofoner**

- Brug handsker, når mikrofonerne skal rengøres.
- De fleste typer af vådservietter, der findes på markedet, kan anvendes i forbindelse med rengøring af mikrofoner.
- De vandbaserede desinfektionsmidler er optimale; en opløsning af 70 % isopropanol kan anvendes. Håndsprit bør **ikke** anvendes.
- Brug en fugtig klud med desinfektion til at aftørre hele mikrofonen.
- Overskydende væske må ikke komme i kontakt med mikrofonernes åbninger. Aftørring med fugtig klud anbefales.
- Efter rengøring skal handsker og klude smides ud; vask dine hænder omhyggeligt med vand og sæbe eller afsprit med desinfektionsvæske.
- Lad mikrofonen tørre i et par minutter, inden brug genoptages.

Kontakt **Oticon**,  
hvis du har spørgsmål

[www.oticon.dk](http://www.oticon.dk)

