


## Vi tager Coronavirus alvorligt!

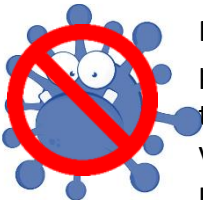

Scantone installerer og servicerer mange borger i alle aldre, i eget hjem og kommer ofte ud til borgere med nedsat immunforsvar, det vil vi gerne respektere og tager følgende forholdsregler:



For at undgå smittespredning, vil vi i den kommende periode spørge ind til borgers ønsker/behov for at vores tekniker gøre brug af masker, handsker og håndsprit. Vores tekniker har håndsprit og masker i bilen klar til brug.



Normalt giver vi altid hånd til vores kunder/borgere, det frarådes af Sundhedsmyndighederne side, hvilke vi selvfølgelig vil efterkomme.



Vi er vant til at stå tæt på dem når vi taler, grundet borgernes høretab, fremover vil vi holde respektafstand og tilbyde samtale med Mino høreforstærker.

---

Har du spørgsmål eller informationer, vi bør vide, kan du skrive til [mie@scantone.dk](mailto:mie@scantone.dk) eller ringe på 4619 5100

**Vi ser frem til at Coronavirussen snart er overstået, så vi får normale tilstande tilbage igen.**

# Anbefaling om desinficering af høretekniske hjælpemidler

## Introduktion

Deling af håndholdte eller kropsbårne produkter mellem flere brugere, kan skabe en risiko for overførsel af viruspartikler.

Alle kan potentielt være smittebærere af Coronavirus, derfor anbefales på det kraftigste at desinficere produkterne ved skift mellem brugere. Anbefalinger om desinficering af høretekniske hjælpemidler i forbindelse med Covid-19, hvor produkter anvendes af flere personer.

Coronavirus er et luftbåret virus, der primært spreder sig gennem dråber, der genereres når en smittet person hoster eller nyser, eller gennem dråber af spyt eller når næsen løber. (kilde: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>)

## Valg af desinfektionsmiddel:

Der skal anvendes et overfladedesinfektionsmiddel, der er effektivt til at dræbe indkapslet vira (såsom den nye Corona-virus). Følgende desinfektionsmidler anbefales: Vandbaseret desinfektions-middel anbefales generelt - 70% isopropanol kan alternativ benyttes.

**Anvend ikke:** Desinfektionsmiddel med hudblødgøringsmidler, som ofte findes i håndsprit/gel. Desinfektionsmidler der indeholder ethanol, da det kan skade produkterne. Blegemiddel (Der indeholder klor eller peroxider, f.eks. brintoverilte)

**Bemærk** at alkoholbaserede desinfektionsmidler muligvis kan skade tekst på enheden, belægnings eller knapper på enheden.

**Vigtige regler for rengøring:** Desinfektionsmidlet skal bruges i henhold til leverandørens specifikationskrav

Tør enheden af med en engangsklud, der er gennemvædet og opvredet med desinfektionsmiddel. Nedsænk eller sprøjt aldrig desinfektionsmiddel direkte på enheden. Sikre at åbninger, især mikrofon-åbninger, ikke påføres væske, da dette kan beskadige elektroniske komponenters funktion. Tryk ikke på nogen knapper, når enheden tørres af med desinfektionsmiddel.

**Bortskaf kluden i en affaldsspand med låg.**

**Ansvarsfraskrivelse!** Scantone er ikke ansvarlig for skader på grund af implementeringen af ovenstående anbefalinger. ***Pas godt på jer selv!***